


ECZEEM

Eczeem is een steriele ontstekingsreactie van de huid, veroorzaakt door meerdere factoren. Er bestaan verschillende vormen van eczeem. Een veel voorkomend eczeem bij jonge kinderen is atopisch eczeem (ook wel constitutioneel eczeem of dauwworm genoemd) waarbij met name erfelijke factoren een belangrijke rol spelen. Een groot probleem bij eczeem is de jeuk. Door de hevige jeuk gaat men krabben en raakt de huid nog meer beschadigd. Het krabben gaat door waardoor het genezingsproces continu verstoord wordt. Andere oorzaken van verergering zijn o.a. transpireren, beschadiging van de huid door kleding (wol, katoen), en huidinfecties. Eén van de pijlers van de behandeling van eczeem is om de beschadiging van de huid, de infecties en het krabben te bestrijden.

TOEPASSING VAN DERMASILK® VERBANDZIJDJE BIJ DE BEHANDELING VAN ECZEEM

Het gebruik van wol en acryl kleding irriteert vaak de huid met eczeem. Katoenvezels hebben meestal een lengte van 2 – 3 cm die samen tot een, niet gladde, draad worden gemaakt.

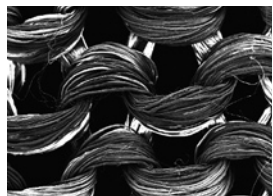

Dermasilk (76 x vergroot)



Katoen (76 x vergroot)

Dermasilk® verbandzijde is de enige natuurlijke vezel (800-1200 meter lang) die volledig glad is waardoor het materiaal niet irriteert. Dermasilk® verbandzijde is vervaardigd van 100% ongebleekte, ongeverfde natuurzijde. Dermasilk® verbandzijde beschermt de huid tegen beschadiging door krabben en door textiel, waardoor bij gebruik roodheid en jeuk zullen afnemen en de slaap zal verbeteren. Daarnaast heeft Dermasilk® verbandzijde een anti-bacteriële werking waardoor infecties en jeuk worden voorkomen. Dermasilk® verbandzijde is zeer goed vocht- en luchtdoorlatend waardoor geen transpiratie of warmtestuwing optreedt. Door deze eigenschappen versnelt Dermasilk® verbandzijde het genezingsproces bij eczeem en andere jeukende huidaandoeningen zoals psoriasis.

AEGIS™

Dermasilk® verbandzijde heeft een anti-bacteriële werking door toepassing van AEGIS™. AEGIS™ is geen chemische toevoeging die kan verdampen of worden uitgespoeld, maar een permanente bewerking van het oppervlak van de zijden draad waardoor bacteriën op een mechanische wijze worden gedood en groei van bacteriën wordt voorkomen. Hierdoor nemen jeuk en roodheid af.



DERMASILK® VERBANDZIJDJE HEEFT DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Voorkomt huidbeschadiging door kleding of door krabben bij eczeem of andere huidaandoeningen. Roodheid en jeuk worden minder en het slapen verbetert. Het genezingsproces wordt hierdoor versneld.
- In combinatie met zalf versterkt het de werking van zalf.
- Beschermt tegen infecties door de speciale AEGIS® anti-bacteriële bewerking, waardoor jeuk en roodheid afnemen.
- Dermasilk® verbandzijde draagt zeer comfortabel. De gebruikte zijde is vederlicht, zeer goed ademend en vochtdoorlatend waardoor transpiratie en warmtestuwing wordt voorkomen.
- Dermasilk® verbandzijde is rekbaar waardoor het goed past en aansluit op de huid

HET WASSEN VAN DERMASILK®

Dermasilk® verbandzijde kan eenvoudig gewassen worden met een neutraal wasmiddel of zoals het eigen haar met neutrale shampoo. Vermijd wasverzachter en was met de hand of in de wasmachine met een wolwasprogramma tot 40°C. Door het gladde oppervlak van zijde worden vuil en zalf eenvoudig verwijderd. Goed naspoelen met schoon water om zeepresten te verwijderen. Dermasilk® verbandzijde kan niet in de droogtrommel. In verband met verschonen is het raadzaam te beschikken over meerdere verbandpakken.



BESCHIKBARE MATEN:

VOOR KINDEREN VAN 0 – 4 JAAR:

Dermasilk® verbandpak met voetbescherming en afneembare handbescherming, maat 62, 68, 74, 86 en 98.
Dermasilk® masker baby.

VOOR KINDEREN VAN 4 – 12 JAAR

Dermasilk® verbandpak maat 110, 116, 134 en 152.
Dermasilk® masker kleuter.

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN

Dermasilk® verbandbroek damesmodel en herenmodel, maat S, M, L, XL en XXL
Dermasilk® verbandshirt met lange en korte mouwen, dames- en herenmodel maat S, M, L, XL en XXL.
Dermasilk® verbandslip, heup of broek, damesmodel maat S, M, L, XL en XXL.
Dermasilk® verband boxershirt herenmodel, maat S, M, L, XL en XXL.
Dermasilk® masker volwassenen.
Dermasilk® oogmasker.

VOOR HANDEN EN VOETEN:

Dermasilk® verbandhandschoenen maat XXS (tot 4 jaar), XS (tot 9 jaar), S, M, L en XL.
Dermasilk® verbandsokken schoenmaat 21-26/27-32/33-36/37-38/39-40/41-42/43-45 en 46-48.
Dermasilk® universele verbandkniekous en verbandbeenkous (standaard en lang).

VOOR KNIËN EN ELLEBOGEN

Dermasilk® buisvorm 3 x 33 cm en 2 x 50 cm.

DE KOSTEN EN VERGOEDING

De kosten van de Dermasilk® verbandmiddelen worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars, mits voorgeschreven door huisarts of specialist.

VERKRIJGBAARHEID VAN DERMASILK®

Dermasilk® is verkrijgbaar bij de apotheek of Cara C'air.

In te vullen door arts

_____ stempel arts _____

Handtekening arts: _____

Opmerkingen: _____

In te vullen door verzekerde

Naam: _____ M/V

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____

Geboortedatum _____

Zorgverzekeraar: _____

BSN/Polisnummer: _____

Email: _____

Gewenste producten invullen.

Deze kaart volledig invullen, zonodig dubbelvouwen, dichtplakken en versturen naar Cara C'air. Vergeet niet de gewenste maten en aantallen aan de ommezijde in te vullen.

Zodra wij de kaart ontvangen leveren we zo spoedig mogelijk de producten. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Cara C'air infolijn: 023-5392288.

Cara C'air

ANTWOORDNUMMER 952

1970 WG VELSERBROEK

Verbandmiddel Dermasilk®	Maat	Aantal
Verbandpak 0 – 12 jaar	62/68/74/86/98/110 (3 st.) 116/134/152 (2 st.)*	
Verbandshirt m/v* mouw kort/lang* (2 st.)	S / M / L / XL / XXL*	
Verbandbroek m/v* (2 st.)	S / M / L / XL / XXL*	
Verbandslip dames heup/broek (3 st.)	S / M / L / XL / XXL*	
Verbandboxershorts heren (3 st.)	S / M / L / XL / XXL*	
Verbandhandschoenen (3 paar)	XXS / XS / S / M / L / XL*	
Verbandsokken (5 paar)	21-26/27-32/33-36/37-38/39-40/41-42/43-45/46-48* standaard / lang*	
Verbandkniekous universeel (4 st.)*	standaard / lang*	
Verbandbeenkous universeel (4 st.)	S / M / L / XL*	
Ulceriset normaal/lang*	Baby / Kleuter / Volwassenen / Oog*	
Verbandmasker (2 st.)	3x 33 cm. en 2x 50 cm.	
Verbandbuisvorm		

© 2010-02

Cara C'air infolijn 023 - 539 22 88

www.dermasilk.nl

DERMASILK® VERBANDZIJDE HEEFT DE VOLGENDE VOORDELEN:

- Dermasilk® is niet geweven maar gebreid, waardoor het elastisch is.
- Bij het Dermasilk® verbandpak met hand- en voetbescherming zijn de handen, t/m maat 98 eenvoudig vrij te maken van de geïntegreerde wanten.
- Alle zomen zijn aan de buitenzijde gemaakt om irritatie te voorkomen.
- De lengte van de mouwen en broekspijpen is eenvoudig aan te passen.
- Dermasilk® kunt u goed gebruiken als pyjama of onder uw kleding. Dermasilk® verbandsokken kunnen overdag onder de eigen sokken worden gedragen.
- Dermasilk® verbandhandschoenen zijn ook geschikt om onder latex handschoenen te gebruiken (ziekenhuispersoneel, tandartsen, kappers).

Dermasilk® verbandkniekousen kunnen gedragen worden onder therapeutische elastische kousen. Ze zijn elastisch, sluiten glad aan op de huid, rimpelen niet en verlengen de levensduur van de therapeutische kous. De Dermasilk® verbandkniekous wordt ook gebruikt bij de behandeling van een open been in combinatie met een speciale elastische kous (Dermasilk® Ulceriset).



DERMASILK® UNIVERSELE VERBANDKOUSEN

De Dermasilk® verbandkousen zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van huidaandoeningen aan het been en bescherming van de kwetsbare huid bij veneuze insufficiëntie. Ze zijn vervaardigd van anti-microbiële zijde die infecties bestrijdt en garant staat voor een optimale warmte- en vocht regulatie. Door de elasticiteit dragen zij zorg voor een ideale pasvorm.

Indicaties:

- Bij huidaandoeningen van het been zoals eczeem en wondjes.
- Als beschermende verbandkous onder therapeutisch elastische kousen bij veneuze insufficiëntie.
- Verkrijgbaar als kniekous en beenkous in twee lengtes

DE DERMASILK® ULCERSET

De Dermasilk® Ulceriset is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van het veneuze ulcus. De set bestaat uit de Dermasilk® verbandkniekous (twee stuks) en een hoogwaardige compressiekous die samen voor de therapeutische effectieve druk van 40mmHg rond de enkel zorgdragen. De ulceriset is een comfortabele vervanging voor het compressieverband met korte rek en leverbaar in de maten S, M, L en XL.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over Dermasilk® verbandzijde kunt u contact opnemen met Cara C'air:




Cara C'air®

PROFESSIELE ZORG VOOR EEN GEZOND BINNENMILIEU

Cara C'air B.V. - Zadelmakerstraat 28 - 1991 JE Velselbroek
Postbus 2030, 1990 AA Velselbroek
tel.: 023 – 539 22 88 fax.: 023 – 538 76 93
www.dermasilk.nl info@dermasilk.nl

LITERATUUR

- 1 Clinical effectiveness of a silk fabric in the treatment of atopic dermatitis; Ricci G. et al. BJOD, 2004, 150:127-131.
- 2 Treatment with specially manufactured silk clothes (Dermasilk®) in children with atopic dermatitis, Fischer B. et al. EAACI, 2005.
- 3 Antimicrobial Silk Clothing in the Treatment of Atopic Dermatitis Proves Comparable to Topical Corticosteroid Treatment. G. Senti, Dermatology 2006;213:228-233

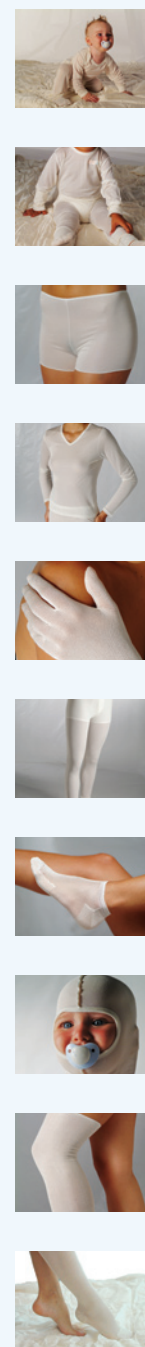

Dermasilk® anti-microbiële verbandzijde

Voor de behandeling van (atopische) dermatitis en andere huidaandoeningen.

Op recept verkrijgbaar bij de apotheek.